


# How to use the Linking Set / So nutzen Sie das Verlinkungs-Set

## 1 Download / Herunterladen

Download a graphic at share.problind.org. Choose „Braille embossing“.

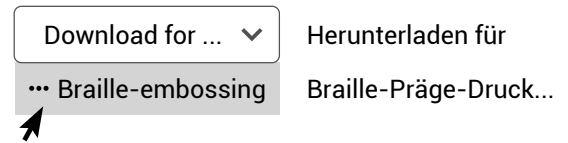

Laden Sie eine Grafik von share.problind.org herunter. Wählen Sie „Braille-Präge-Druck“.


## 2 Apply stickers / Sticker anbringen

Apply 4 markers and a QR-code to the Braille graphic. Position the markers in the four round shapes in the corners and the QR-code in the square shape on the top right.

4x  Markers

1x  QR-Code


Kleben Sie 4 Marker und einen QR-Code auf die Braille-Grafik. Positionieren Sie die Marker in den vier runden Formen in den Ecken, den QR-Code in der quadratischen Form rechts oben.

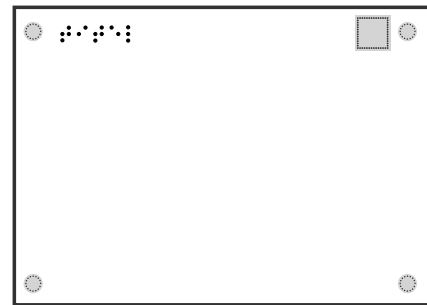

## 3 Link digital file / Digitale Datei verknüpfen

Place the graphic on the Tactonom Reader. Select „New page“ from the main menu. The Tactonom Reader recognizes that the QR-code must be linked to the corresponding digital file in the „Share“ database. Therefore, the Tactonom Reader automatically asks the database (internet connection needed) which graphics were downloaded for Braille embossing within the last 60 minutes. Choose the right graphic with the „Forward“ and „Back“ buttons and confirm your selection with the „Enter“ button. Now, this QR-code works on all systems.

Legen Sie die Grafik auf den Tactonom Reader auf. Wählen Sie „Neue Seite“ über das Hauptmenü. Der Tactonom Reader erkennt, dass der QR-Code mit der zugehörigen digitalen Datei in der Datenbank „Share“ verknüpft werden muss. Deshalb fragt der Tactonom Reader automatisch in der Datenbank ab (Internetverbindung erforderlich), welche Grafiken innerhalb der letzten 60 Minuten „für Braille-Präge-Druck“ heruntergeladen wurden. Wählen Sie mit der „Weiter“- und „Zurück“-Taste die richtige Grafik aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der „Enter“-Taste. Nun funktioniert dieser QR-Code auf allen Systemen.

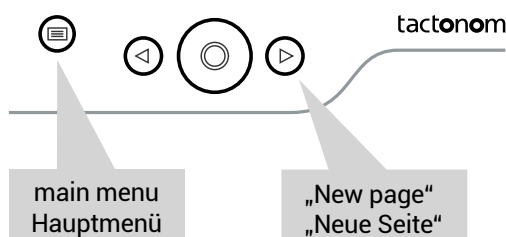

accessible version /  
barrierefreie Version

